



Bereits seit

2012

erfolgreich im Markt

Nestlé Health Science war der **erste Hersteller**, der ein universell einsetzbares Behältnis einführte, das auch als geschlossenes System funktioniert.

Das unterstreicht **Nestlés Anspruch** als innovativer Partner in der klinischen Ernährung.

isomax

SmartFlex® DAS ORIGINAL



SMARTE VERPACKUNG



Im SmartFlex® vereinen sich die Vorteile von Nahrungsbeutel und Glasflasche in einer Verpackung:

- Strapazierfähig und leicht
- Stabil und standfest
- Umweltfreundlich:
 - Geringer Energie- und Wasserverbrauch bei Produktion
 - Geringes Abfallvolumen (zieht sich bei Applikation zusammen)
 - Recycling als Kunststoffmüll über duales System
- Made in Germany: Produziert in Osthofen (Rheinland-Pfalz)



SmartFlex® DAS ORIGINAL



UNIVERSELLE KAPPE

- Ermöglicht Applikation über Spikeset als geschlossenes System für hygienische Nahrungsgabe
- Weithalsverschluss ermöglicht eine unkomplizierte Wiederbefüllung zur Gabe zusätzlicher Flüssigkeit
- Kompatibel mit allen Überleitsets mit ENPlus- oder Universalanschluß
- Sicherheitsverschluß ist vollständig manipulationsicher (Verschluss- und Originalitäts-Sicherung)



1000 ml

500 ml

250 ml



SmartFlex® DAS ORIGINAL



NEUES ETIKETT

- Neues, moderneres Logo
- Restvolumen während der Applikation ablesbar
- Produktname auch über Kopf lesbar
- Hexagon als zentrales Gestaltungselement mit zusätzlichem Farbcode.
- Die wichtigsten Produkteigenschaften werden in Hexagonen hervorgehoben.

SmartFlex® DAS ORIGINAL



EINFACHE ANWENDUNG



- Wiederbefüllbar zur zusätzlichen Flüssigkeitsgabe
- Wiederverschließbar bei Unterbrechung der Nahrungsgabe
- Mit integrierter Aufhängung zur einfachen Handhabung

Einfach und sicher:

Die Gabe von Sondennahrung im SmartFlex® über ein geschlossenes System gelingt in wenigen Schritten!

- Hände gründlich waschen und desinfizieren
- Unversehrtheit der Verpackung und Aussehen des Inhalts prüfen
- SmartFlex® leicht schütteln



- Obere Verschlusskappe abschrauben und sicherstellen, dass die Weithalsverschlusskappe fest verschlossen ist
- Falls vorhanden, Rollenklemme des Überleitsets schließen



- Das Siegel des SmartFlex® mit dem ENPlus-Spike des Überleitsets durchstechen



- ENPlus-Spike konnektieren und fest verschrauben



- Integrierte Aufhängung am SmartFlex®-Boden aufklappen
- SmartFlex® an Tisch- oder Infusionsständer hängen



- Rollenklemme ggf. öffnen und Nahrungsapplikation über Pumpe oder Schwerkraft starten



Nach Applikation der Nahrung:

Der SmartFlex® kann zur zusätzlichen Flüssigkeitsgabe verwendet werden.

- Flüssigkeitsgabe über SmartFlex® ist mehrmals innerhalb von 12 h bzw. einmal innerhalb von 24 h möglich. Bei mehrmaliger Gabe innerhalb von 12 h ist jedes Mal die grundsätzliche Vorgehensweise zu beachten!



- SmartFlex® zieht sich bei Entleerung zusammen, daher vor der Wiederbefüllung an Verschlusskappe und Aufhängung auseinanderziehen
- Universalverschluss abschrauben und die Reste des durchstochenen Siegels entfernen



Grundsätzliche Vorgehensweise:

- SmartFlex® mit frisch abgekochtem und auf Raumtemperatur abgekühltem Leitungswasser spülen, bis keine Nahrungsreste mehr zu sehen sind
- SmartFlex® mit frisch abgekochtem und auf Raumtemperatur abgekühltem Leitungswasser zur Flüssigkeitsgabe wiederbefüllen und applizieren






* Zertifikat auf Anfrage erhältlich

Hinweis:

Zur Flüssigkeitsgabe bei Sondenpatienten sind grundsätzlich die Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert-Koch-Institut (RKI) zur Infektionsprävention in Heimen zu berücksichtigen (Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch - Gesundheitsschutz 2005 - 48:1061-1080).


W I E D E R B E F Ü L L U N G *

HOCHKALORISCH

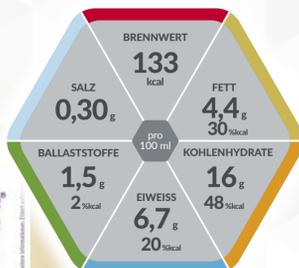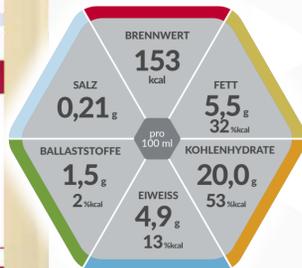
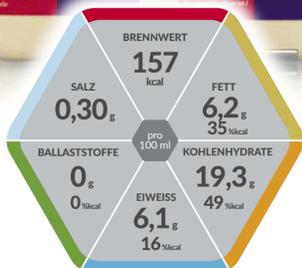


NORMOKALORISCH

GASTRO-INTESTINALE INTOLERANZ

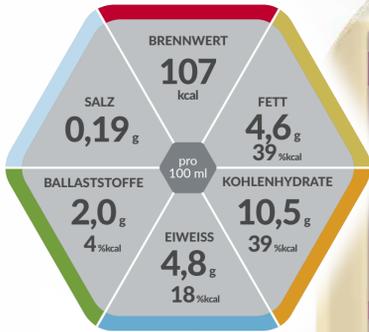

PÄDIATRIE

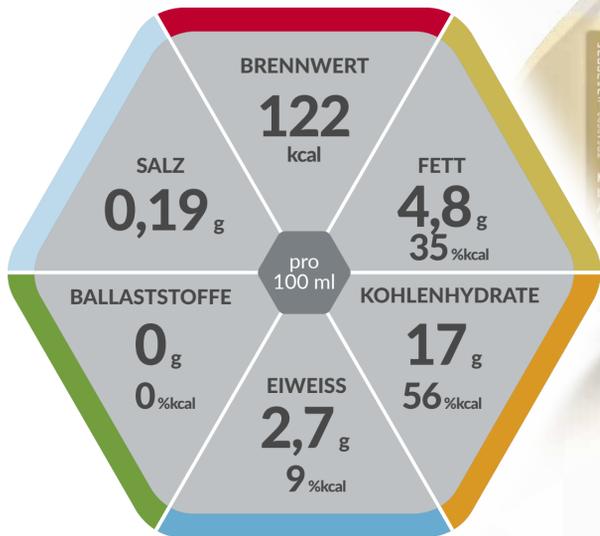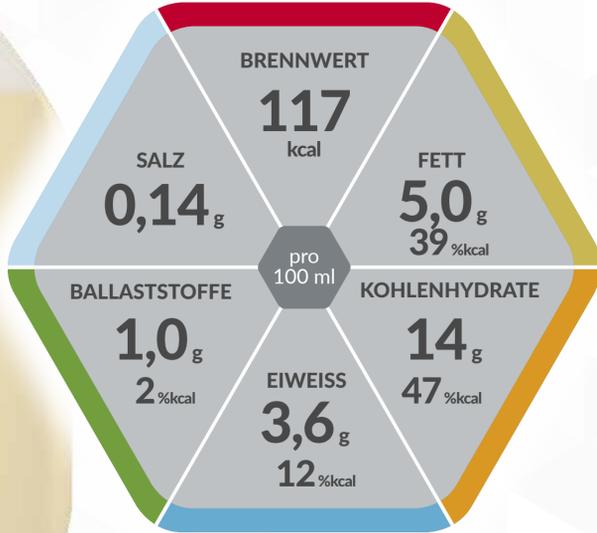

UNSERE SMARTE VERPACKUNG



UNSER SMARTES SORTIMENT

Bezeichnung		Artikelnr.	PZN pro Stück	PZN pro VE
isosource® standard	12 x 500 ml	12138996	07756037	07756020
	9 x 1.000 ml	12143836	07756066	07756043
isosource® standard fibre	12 x 500 ml	12139014	07756103	07756089
	9 x 1.000 ml	12140437	07756132	07756126
isosource® standard balance	12 x 500 ml	12214376	07316025	07316048
	9 x 1.000 ml	12214500	07315824	07315994
isosource® standard naturel	12 x 500 ml	12140427	07755813	07755807
isosource® standard optifibre	12 x 500 ml	12140913	07755842	07755836
isosource® protein	12 x 500 ml	12371410	14382778	14382761
isosource® protein fibre	12 x 500 ml	12138994	07756008	07755960
isosource® energy	12 x 500 ml	12138964	07756155	07756149
	9 x 1.000 ml	12140394	07755894	07755888
isosource® soy energy fibre	12 x 500 ml	12172213	09254541	09254535
	9 x 1.000 ml	12172197	09254564	09254558
isosource® junior vanille	24 x 250 ml	12231915	10225970	10225987
isosource® junior mix	12 x 500 ml	12376603	13862743	13862915
peptamen®	12 x 500 ml	12383173	09254587	09254570
	9 x 1.000 ml	12383174	09254601	09254593

Alle SmartFlex® Produkte sind Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Sondennahrungen zum Diätmanagement bei bestehender Mangelernährung oder bei Risiko für eine Mangelernährung. Als einzige Nahrungsquelle geeignet.

Wichtige Hinweise: Unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Geeignet ab 3 Jahren. Die Pädiatrieprodukte Isosource® Junior und Isosource® Junior Mix sind geeignet ab 1 Jahr. Verordnungsfähig gemäß Arzneimittel-Richtlinie. (gem. AM-RL vom 18.12.2008/22.01.2009)